


**MAS
KISS**

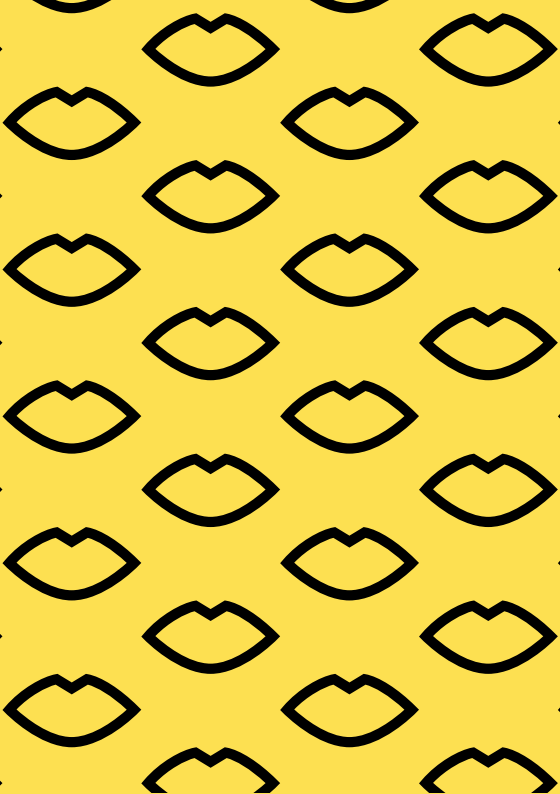

EXPRESS YOUR HEALTH



***DZIĘKI ZA ZAKUP SWOJEJ MASKI.
MOŻESZ SOBIE POGRATULOWAĆ
– TO ZDROWY WYBÓR.***

***TERAZ MOŻESZ NAPRAWDĘ
ODETCHNAĆ. TWOJA MASKA
MASKISS O TO ZADBA. A POZA
TYM ZADBA O TWÓJ DOBRY
HUMOR, WYRÓŻNI CIĘ Z TŁUMU.***

***NO I Z PEWNOŚCIĄ BĘDZIE CI W
NIEJ DO TWARZY.***

***DZIĘKI, ŻE DOŁĄCZYŁEŚ DO
SPOŁECZNOŚCI MASKISS. JEST
NAM NIEZMIERNIE MIŁO, LICZYMY,
ŻE ZOSTANIESZ Z NAMI NA DŁUŻEJ***

EXPRESS YOUR HEALTH!

Gravain & Tomasz


O TWOJEJ MASCE

Włożyliśmy mnóstwo pracy i serca, żeby uszyć dla Ciebie maskę Maskiss. Zadbaliśmy o to, żeby była wygodna, przyjemna w noszeniu, dopasowała się do jednej, jedynej, unikalnej czyli Twojej twarzy.

Zatroszczyliśmy się o to, żeby była nie tylko ładna, ale przede wszystkim chroniła Twoje zdrowie. Dlatego serce, a dokładniej ptuca Twojej maski to innowacyjny filtr Respilon-57. Stworzona w nano-technologii membrana z nanowłókna zatrzymuje nawet najmniejsze szkodliwe mikrocząsteczki tj. jak smog, wirusy, bakterie, roztocza, pyłki czy inne alergeny.

Zresztą co tu dużo gadać, spójrz sam i przekonaj się, że masz ochronę najlepszą jaką się da.

Membrana Respilon z Twojej maski jest dokładnie przebadana i certyfikowana:

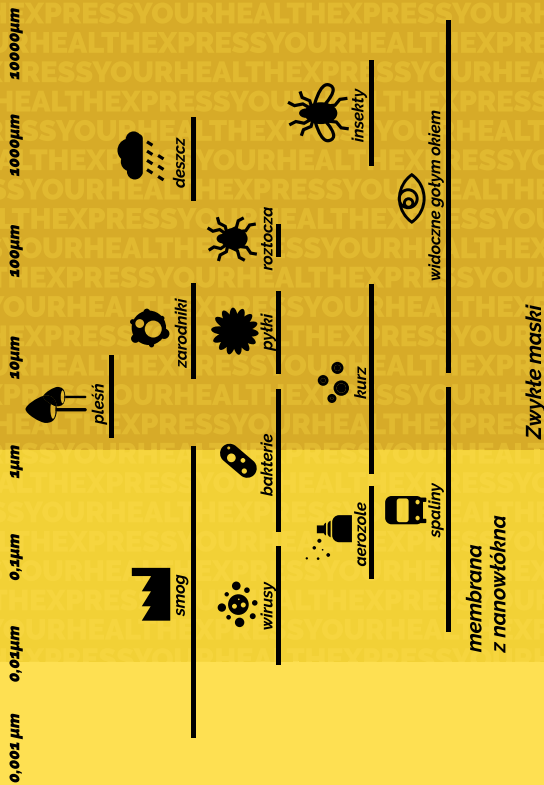

No i fajnie. A teraz: Jak zakładać maskę?

1) wyjmij maskę z opakowania ochronnego, przyłóż do twarzy i wyreguluj usztywniony nosek tak żeby dokładnie przylegał do nosa i żeby żadne nieproszone cząsteczki nie miały do niego



2) przymierz gumki, załóż je na uszy. Jeśli są za długie - żaden problem, zdejmij maskę i dostosuj długość gumki specjalnym regulatorem.



3) załóż maskę, rozciągnij ją na twarzy na boki, potem w górę i w dół żeby pasowała jak ulał.



4) baw się dobrze, zaskakuj innych i oddychaj pełną piersią.



Jak wymieniać filtr?

1) wyjmij filtr z torebki ochronnej



2) rozchyl otwór kieszonki na filtr od strony wewnętrznej maski



3) wsuń filtr i rozprostuj go



4) zwróć uwagę na to czy jest prawidłowo umieszczony czyli czy znajduje się między brzegami nosa i brody



Zalecamy:

1. Wymieniać filtr co 20 godzin
2. Jeśli chcesz, możesz prać maskę w temperaturze 40 stopni

Nie zalecamy:

Dawać do zabawy, oraz zakładać na twarz dzieciom poniżej 5 roku życia. Muszą jeszcze chwile poczekać zanim dorosną do społeczności Maskiss

Wzory:

Maskiss to nie jeden czy dwa wzory. *Zawsze znajdziesz coś dla siebie. A jak nie znajdziesz, to zamów własny wzór. Jeden, jedyny, niepowtarzalny jak Ty.*

Wystarczy, że wyślesz wybraną przez siebie grafikę na adres kontakt@maskiss.pl, a my zadbamy, żeby Twoja wymarzona maska trafiła w Twoje ręce, a właściwie na Twoją twarz, najszybciej jak to możliwe.

Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia w kolejnym wzorze Maskiss

***Dowiedz się więcej na naszej stronie:
www.maskiss.pl***

